



样本释放剂

便捷 | 高效 | 安全 | 通用

产品特点


- 便捷：无需核酸提取
- 高效：采样提取一步完成
- 安全：减少操作人员操作过程
- 通用：高效释放DNA和RNA




使用方法

实验开始前，将样本释放剂取出平衡至室温。

- 配合非灭活型一次性使用病毒采样管使用时，将0.2 mL样本释放剂与0.2 mL非灭活型一次性使用病毒采样管采集的样品混匀，室温静置5 min，混匀，然后直接作为核酸扩增模板，按照PCR体系进行扩增即可。
- 单独使用样本释放剂采样时，用拭子取样后，将拭子折断，拭子头浸泡在样本释放剂中，拧紧管盖，混匀，室温静置5 min，混匀，然后直接作为核酸扩增模板，按照PCR体系进行扩增即可。

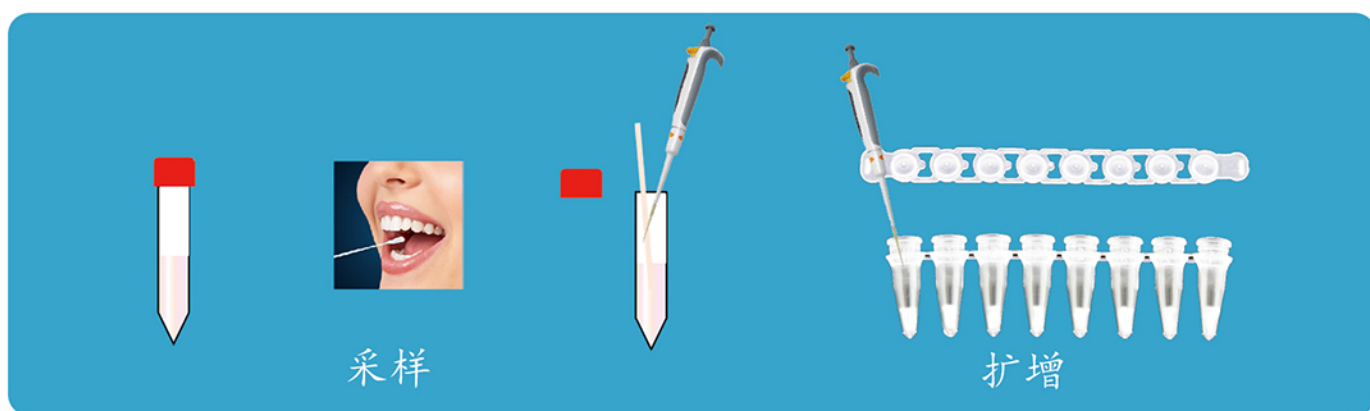

释放效果

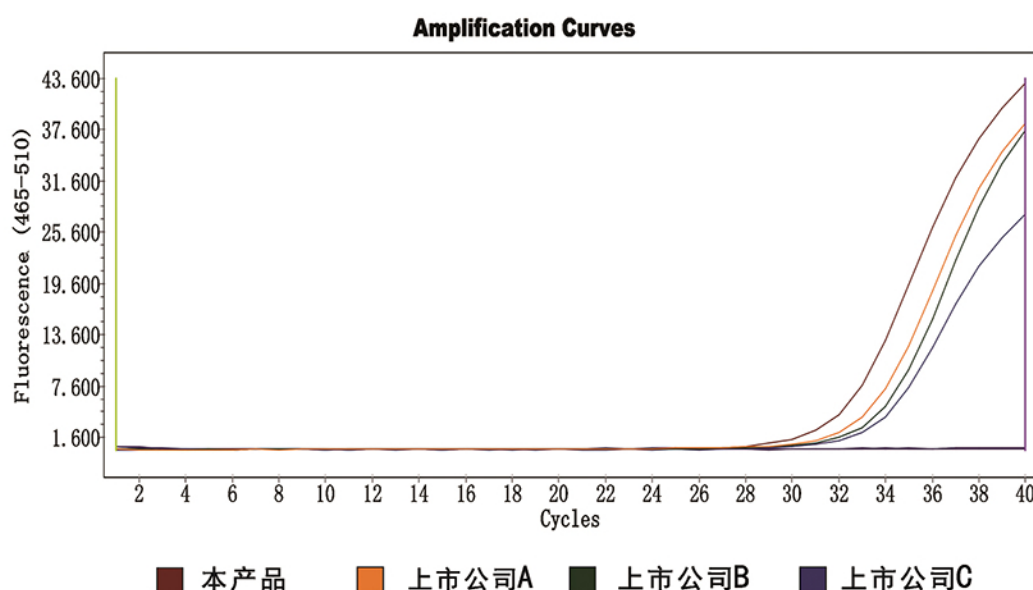

应用

普适性免提取采样管，可用于临床SARS-Cov2、流感、禽流感（如H7N9）、手足口、麻疹、诺如、轮状等病毒标本的直接采样，采样后直接用于核酸扩增。

